

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input checked="" type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	加做/複驗時間	三重院區	板橋院區	備註
08001(S)	RBC	紫頭試管	1~3ml血液	急件(S)：50分鐘 普通：1個工作天	24小時內	自行檢驗	自行檢驗	採檢後需輕搖試管，使檢體與抗凝劑混合均勻
08002(S)	WBC							
08003(S)	Hb							
08004(S)	Hct							
08006(S)	Platelet							
08007	Parasite (malaria smear)							
08008	Reticulocyte							
08009	RBC morphology							
08011(S)	CBC- I							
08013(S)	Differential Count							
08014	CBC (WBC, RBC, Hb)							
08082	CBC-III (WBC, RBC, Hb, Hct, MCV五項)							
11001	ABO Type							
11003	Rh Type							
090291	Micro-Bilirubin	小兒毛細管	100 $\mu$ L	50分鐘	不可加做			檢體平放靜置即可
08005	ESR	黑頭專用採檢試管	2ml血液	1工作天	不可加做			採檢後需輕搖試管，使檢體與抗凝劑混合均勻
08024	Fibrinogen	藍頭試管	2ml血液	急件(S)：50分鐘 普通：1個工作天	不可加做			
08026(S)	PT							
08036(S)	APTT							
08079	D-Dimer							

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input checked="" type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗 時間	三重院區	板橋院區	備註
09041	Blood Gas Analysis	去針頭之針筒	2ml以上 血液	50分鐘	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	採檢前針筒請+heparin 採後請冰浴送檢
10804	Methemoglobin							

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input checked="" type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗 時間	三重院區	板橋院區	備註
090051	Glucose Randon(One Touch)	N/A	1滴全血	5分鐘	N/A	自行檢驗	自行檢驗	
090052	Glucose One Touch(病房自驗)							
090053	Glucose AC(One Touch)							
090054	Glucose PC(One Touch)							

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input checked="" type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗 時間	三重院區	板橋院區	備註
FILMME	腦膜炎核酸檢測	白頭館	3mL CSF	1工作天	不可加做	自行檢驗	送回三重	
FILMRP2	呼吸道多標的核酸檢測	Throat swab	咽喉/喉頭拭子					
FILMPN	肺炎多標的核酸檢測	無菌盒	Sputum/BAL					

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input checked="" type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗 時間	三重院區	板橋院區	備註
06001	PH	尿液試管	8~10ml 尿液	急件(S)：50分鐘  普通：1個工作天	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	
06002	Specific Gravity							
06003	Protein							
06004	Glucose							
06007	Ketone							
06009	Urine sediment							
0600A	Apperance							
0600B	Color							
06012(S)	Urine Routine(含sedment)							
060204	OB							
06505(S)	★ Pregnancy test ★							
12170T	陰道滴蟲快速篩檢(自費)							

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input checked="" type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗 時間	三重院區	板橋院區	備註
07001	Stool OB	糞便盒	花生粒大小 糞便	普通：1個工作天	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	
07003	Amoeba direct smear							
07009	Stool Routine							
07011	Parasite ova direct smear							
07016	蟯蟲膠片	蟯蟲膠片	N/A					請黏貼肛門口周圍

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input checked="" type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：捐血中心								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	加做/複驗時	三重院區	板橋院區	備註
11002	Crossmatching test	紫頭試管	2~3ml全血	30~90分鐘	3天	自行檢驗	自行檢驗	
11004	Antibody screen							
11005	Antibody identification	2紫頭管	4mL 全血	5-7個工作天	不可加做	外送台北捐血中心		
11006	不規則抗體之沖出及鑑定	2紅頭管	10mL 血清					
11007	血小板抗體	2紫頭管	4mL 全血					
11008	特殊血型 -Lewis antigen							
11009	特殊血型 -D,E,C,e,c							
12087	HLA-ABC(多種抗原)multiple							
12088	HLA-DR(多種抗原)multiple							
12176	HLA-ABC(單一抗原)single							
12177	HLA-DR(單一抗原)single							

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input checked="" type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：									
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	加做/複驗時	三重院區	板橋院區	備註	
090029	24小時DIA BUN	白頭試管 (不含GEL)	3-5mL DIA	普通：1個工作天	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	檢驗前請先與本科 聯繫相關事項	
090056	0小時DIA Glu.								
090057	2小時DIA Glu.								
090058	4小時DIA Glu.								
090156	0小時DIA Cre.								
090157	2小時DIA Cre.								
090158	4小時DIA Cre.								
090159	24小時DIA Cre								
090039	24H Urine BUN								3-5mL 尿液
090164	24小時U.Cre								
16001	Semen analysisfluid	無菌廣口瓶	精液	普通：1個工作天	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	檢驗前請先與本科 聯繫相關事項	
16002	Ascitic fluid analysis	白頭試管 (不含GEL)	3-5mL Ascitic						
160021	生化 Ascitic		3-5mL DIA fluid						
160022	DIA分析		3-5mL Pleural						
16003	Pleural fluid analysis		3-5mL CSF						
160031	生化 Pleural		3-5mL						
16006	CSF analysis		Synovial fluid						
160061	生化 CSF		3-5mL Pericardial fluid						
16008	Synovial fluid analysis		綠頭試管+ 白頭試管						3-5mL Pericardial fluid
16013	外送 關節囊液分析(含偏光鏡檢)	白頭試管 (不含GEL)	2mL Vomit fluid						
16009	Pericardial fluid analysis	無菌廣口瓶				自行檢驗	自行檢驗		
30514	嘔吐物潛血反應檢查								

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別：血液 血液氣體 快速血糖 分子生物 尿液 糞便 血庫 體液 生化 血清免疫 外送：

醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗時效(註1)		三重院區	板橋院區	備註	
					室溫(22~25°C)穩 定時間(小時)	冷藏(2~8°C)穩定 時間(小時)				
09002(S)	BUN	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管	3mL以上 血液	急件(S)：50分鐘  普通：3個工作天	8	48	自行檢驗	自行檢驗		
09005(S)	Glucose				8	48				
09011(S)	Ca				8	48				
09015(S)	Creatinine				8	48				
09017(S)	Amylase				8	48				
09021(S)	Na				8	48				
09022(S)	K				8	48				
09023(S)	Cl				8	48				
09025(S)	AST(GOT)				8	48				
09026(S)	ALT(GPT)				8	48				
09029(S)	Bilirubin total				立即分析	48				
09032(S)	CPK				4	8				
09033(S)	LDH				2	不建議				
09037	Ammonia	紫頭管	2ml 血液	不可加做	不可加做	自行檢驗	自行檢驗	採檢後須冰浴立即分析		
09059(S)	Lactic Acid	灰頭試管	2ml 血液	4	不可加做			採檢後須冰浴立即分析		
09064(S)	Lipase	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管	3mL以上 血液	3個工作天	8			48		
09071(S)	CK-MB				8			48		
09099S	Troponin I				8			48		
10817	Alcohol				含分離膠之生化試管			立即分析	48	採檢後須冰浴立即分析
12015S	CRP	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管	3mL以上 血液	3個工作天	8			48		
12015H	Hs-CRP				8			48		
12192	PCT(Procalcitonin)	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管(註3)	3mL以上 血液	3個工作天	8			48		
12193	ProBNP				8			48		
09001	Cholesterol				8			48		
09004	TG	紫頭管	2mL血液	3個工作天	8			48	送回三重	
09006	HbA1c				8			48		
09012	P	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管(註3)	3ml 以上 血液	3個工作天	8	48				
09013	Uric Acid				8	48				
09027	Alkaline phosphatase				8	48				

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別：血液 血液氣體 快速血糖 分子生物 尿液 糞便 血庫 體液 生化 血清免疫 外送：

醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗時效(註1)		三重院區	板橋院區	備註
					室溫(22~25°C)穩定時間(小時)	冷藏(2~8°C)穩定時間(小時)			
09030	Direct Bilirubin	1. 含分離膠之生化試管 2. 綠頭試管(註3)	3ml 以上 血液	3個工作天	立即分析	48	自行檢驗	送回三重	需避光保存(未避光, 1小時降低50%)
09031	γ-GT				8	48			
09035	Serum Iron & TIBC				8	48			
090351	Serum Iron				8	48			
09038	Albumin				8	48			
09038A	A/G Ratio				8	48			
09039	Globulin				8	48			
09040	Total Protein				8	48			
09043	HDL				8	48			
09044	LDL				8	48			
09046	Mg				8	48			
12116	Ferritin				8	48			
090111	CA				白頭試管(不含GEL)	3~5ml 尿液			
090211	NA	普通：3個工作天	不可加做	不可加做					
090221	K	不可加做	不可加做						
090231	CL	不可加做	不可加做						
09003	BUN	不可加做	不可加做						
090161	Creatinine	不可加做	不可加做						
09040B	Total Protein	不可加做	不可加做						
12111	MicroAlbumin	不可加做	不可加做						
090112	CA(24hr)	3個工作天	不可加做	不可加做					
090212	NA(24hr)	不可加做	不可加做						
090222	K(24hr)	不可加做	不可加做						
090232	CL(24hr)	不可加做	不可加做						
090039	BUN(24hr)	不可加做	不可加做						
09016H	Creatinine(24hr)	不可加做	不可加做						
09040H	Total Protein(24hr)	不可加做	不可加做						
12111H	MicroAlbumin(24hr)	不可加做	不可加做						

註1.採檢容器為含分離膠之生化試管時，加做/複驗時間如表格內所示；採檢容器為不含分離膠之試管時，加做/複驗時間一律為簽收後4小時內。

註2.緊急檢驗請以綠頭試管送檢，採檢後需上下翻轉6-8次(非劇烈搖晃)，使檢體與抗凝劑混合均勻。

註3.限洗腎室送檢一般生化項目使用。

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input checked="" type="checkbox"/> 血清免疫 <input type="checkbox"/> 外送：								
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體 量/種類	報告時效	加做/複驗時效(註1)		三重院區	板橋院區
					室溫(22~25°C)穩	冷藏(2~8°C)穩定時間(小時)		
12022	$\beta$ -HCG	含分離膠之 生化試管	3ml以上 血液	3個工作天	8	48	自行檢驗	送回三重
09117	T3				8	48		
09010	T4				8	24		
09106	Free T4				8	48		
09112	TSH				8	48		
12007	AFP				8	48		
12021	CEA				8	48		
12081	PSA				3	24		
12198	Free PSA				3	24		
09122	intact PTH				8	48		
12116	Ferritin				8	48		
12077	CA125				8	48		
12078	CA153				8	48		
12079	CA199				8	48		
14051	Anti-HCV				8	48		
14033	Anti-HBs				8	48		
14032	HBsAg				8	48		
14035	HBeAg				8	48		
14049	Anti-HAV IgM				8	48		
14039	HIV				8	48		
12001	RPR				8	48		
12018	TPPA				8	48		
12009	RA Test(定性)				8	48		
12062	Cryoglobubin		不可加做	不可加做				
12020S	Mycoplasma pneumonia IgM(快篩)		8	48				
12172	Stre.Pneumococcus Ag(快篩)	尿液試管	8~10ml 尿液	50分鐘	不可加做	不可加做	自行檢驗	
12191	Legionella pneumophila Ag(快篩)				不可加做	不可加做		
14064	Adenovirus Respiratory Ag(快篩)	喉頭拭紙	N/A		不可加做	不可加做		

註1. 血清檢體於2-8°C可保存48小時，如不能於48小時內完成檢驗請離心分管冷凍保存。  
 註2. 血清檢體於2-8°C可保存24小時，如不能於24小時內完成檢驗請離心分管冷凍保存。 檢體請務必採滿管血量5mL。  
 註3. 接受高劑量生物素治療的病人(> 5 mg/天)，應該距離最後一次服藥至少8小時才能採檢。  
 註4. 陽性檢體保留30天。  
 註5. 抽血前需請病患等待約十分鐘且需要禁食10-12小時。用已預溫至37°C的針筒及試管至少要抽10mL血液，馬上置於37°C水浴或溫箱中，凝固後儘快分離出血清檢驗。

儀器負責人：

品質/技術組長：

主任：

備註
註1
註2
註1
註1
註1
註2
註2
註3、註4
註4
註2、註4
註4
註5

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：台北病理中心										
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類 量/種類	報告時效	可加做時間	備註				
09056	5-HIAA	尿液試管	10ml尿液	1週	1週	集尿桶中加20mL 6N HCL，收集24小時尿液，標示總量，混合均勻取10ml送檢				
091193	ACTH Random	紫頭試管	2~3ml血液			採檢後須冰浴				
10803	Acetaminophen	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			1、冷藏24小時穩定，超過期限請分裝成兩管冷凍。 2、病人須空腹，檢體不可溶血與乳糜。				
27176T	Acetylcholine receptor Ab					血清應避免溶血				
09028	Acid phosphatase					含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	
30020	Anti-cardiolipin- IgG									
30028	Anti-cardiolipin- IgM									
12201	anti-CCP									
12060	anti-dsDNA									
12138	Anti-GBM Ab									
14040	Anti-HAV IgG									
14037	Anti-HBc IgG									
14038	Anti-HBc IgM									
12063	Anti-ENA test									
14036	Anti-HBe									
12056	AMA(anti-mitochondril antibody)									
12057	Anti-Smooth nucle Ab									
10512	Amikacin(Trough)									
10512P	Amikacin(Peak)									
13002	Amoebic Ab									
12053	ANA(antinuclear Ab)									
12171	ANCA(Antineutrophil cytoplasmic Ab)									
12058	APCA(anti-parietal Ab)									
30027	Anti-phospholipid Ab									
12064	Anti-SSA/SSB Ab									
12068	Anti-Thyroglobulin									
12134	Anti-TPO Ab					含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	2-8℃保存24小時，-20℃可長期保存
08072	Antithrombin III									檢體應在採集後1小時內離心，取出血漿立即冷凍
12114	APO-A1									須空腹8小時。測試前4小時不可抽菸，抽菸者Apo-A會下降
12113	APO-B	須空腹12小時，檢體不可冷凍								
10002	Aluminum(Al)	AL專用管	含分離膠之生化試管			3ml以上 血液	1週	1週		
27031	Aldosterone -20℃									
12004	ASLO									
08075	Blood Osmolality									
10802	BarbituratesScreen (尿)	尿液試管		8~10ml尿液						
06010	Bence Jones protein(尿)	含分離膠之生化試管		3ml以上 血液						
12052	β2-microglobulin									
12034	C3									
12038	C4	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週					
09077	Catecholamine					尿液試管	10 mL	桶中加20 ml 6N HCL，收集24小時尿液，標示總量，混和均勻取10 ml送檢。		
10501	Carbamazepine									
12050	Ceruloplasmin									
09083	Cholinesterase									
09113	Cortisol Random									

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：台北病理中心						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類 量/種類	報告時效	可加做時間	備註
10812	Cocaine	尿液試管	8-10ml尿液			
12008	Cold hemoagglutinin	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	
09128	C-peptide					
09047	Cu					
12107A	Chlamydia IgA					
12107B	Chlamydia IgG					
12107C	Chlamydia IgM	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
12189	Chlamydia pneumoniae IgM	尿液試管	10-30 mL			尿液(10mL)或分泌物(使用專用拭子)
12016	Chlamydia trichomatis Ag(urine or swab)	專用拭子				
14004	CMV IgG	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	
09061	CK EP					
12069	Cryptococcus Ag					
10522	Cyclosporin-A					
10511	Digoxin					
10502	Diphenhydantoin					
30023	ECP Test (Eosinphil Cation Protein)					
14046A	EB VCA IgA					
14046B	EB VCA IgM					
14046C	EB VCA IgG					
14047	EBNA Ab					
09127	E2(Estrodinol)					
09131	Estrol(E3)					
09125	FSH					
09130	Folate					空腹，使用methotrexate or Leucovorin藥物不適合檢驗。檢體不可溶血(紅血球釋出)
08038	FDP	藍頭試管	2mL血液			檢體應在採集後1小時內離心，取出血漿立即冷凍
09051	G6PD	紫頭試管	2-3ml血液			
27016	Gastrin					
10518	Gentamycin(Trough)					
10518P	Gentamycin(Peak)					
09108	Growth Hormone					抽血前勿從事激烈活動，抽血前橫臥30分鐘。檢體請離心並分裝血清到塑膠管，冷藏送檢。
13018	H.pylori Ab					
12046	Haptoglobin					溶血檢體不能使用
12184	HBV DNA	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			請抽2支生化試管
14088T	HBV YMDD抗藥性測定					請抽2支生化試管
12185	HCV RNA					請抽2支生化試管
12202	HCV genotype					請抽2支生化試管
08030	Hb EP					
12086	HLA-B27	紫頭試管	2-3ml血液			
12196	HLA-B1502 基因檢測					

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：台北病理中心						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類 量/種類	報告時效	可加做時間	備註
12151	Homocysteine	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	冰浴送檢，儘快分離出血清
14052	HSV IgM					
14069A	HSV1 IgG					
14069B	HSV2 IgG					
14069B	HSV2 IgG					
12163	HTLV-I+II					
12027	IgA					
12030	IgD					
12031	IgE					
12025	IgG					
12029	IgM					
08129	Insulin					
27015	Insulin Ab					
24023	Insulin like GF-1					
12067	Intercellular substance Ab					
14001	Isolation and identification of virus					
12154	Jo-1 Ab					
12118	Legionella pneumophila Ab					
10520	Lithium					
12164	Lipoprotein A					
09126	LH	藍頭試管	2.0 mL	1週	1週	避免檢體溶血 取血清-20℃冷凍保存
08126	Lupus anticoagulant					
12020	Mycoplasma Ab	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	在採集後一小時內離心，取出血漿立即冷凍待收。
30021	CAP Phadiatopin					
30022	Allergen test					
10806	Methyl alcohol					
14070	Measles IgG					
14007	Measles IgM					
14009	Mumps Virus IgG					
14054	Mumps Virus IgM					
12061	Myoglobin					
09042	PAP(prostate acid phosphatase)					
09049	Pb (Lead)	紫頭試管	2~3ml血液	1週	1週	需同時加作10817(Alcohol)
09105	Progesterone	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
09120	Prolactin					
12011	RA (定量)					
08077	Protein C	藍頭試管	2ml血液			
08122	Protein S	糞便盒	花生粒大小糞便			
14026	Rota Virus Ag					
14058	RSV Ag	鼻腔沖洗液/鼻咽拭子	1mL			
14044	Rubella IgG	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
14045	Rubella IgM					
12173B	RNP/Sm Ab					
27032	Renin Activity (p)	紫頭試管	2~3ml血液			
12080	SCC	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
09065	Serum protein EP					
09065U	Urine protein EP					
12174	Scl-70 Ab					
09078	Stone Analysis	乾淨容器	花生粒大小	4週	1週	檢體應在採集後1小時內離心，取出血漿立即冷凍
09009	T3 uptake ratio	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
09121	Testosterone					
10509	Theophylline					

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：台北病理中心						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類 量/種類	報告時效	可加做時間	備註
10519	Tobramycin	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液	1週	1週	
27069	TSH Receptor Ab					
09111	Thyroglobulin					
14071	Toxoplasma IgM					
14042	Toxoplasma IgG					
12048	Transferrin					空腹12小時，只可以喝水
08025	TT(Thrombin time)					藍頭兩管在採集後一小時內離心，取出血漿立即冷凍待收。
06503	Urine osmolarity					
14068	Varicella Zoster IgG					
14013	Varicella Zoster IgM					
10510	Valproic Acid					
10531P	Vancomycin(peak)					Peak：開始給藥後的2小時(輸注完畢1小時後)
10531	Vancomycin(trough)					Trough：下次給藥前的30分鐘
09129	Vitamin B12					空腹，檢驗前避免服用heparin，ascorbic acid，fluoride及酒精。
09052	VMA	尿液試管	8~10ml 尿液			集尿桶中加20 ml 6N HCL，收集24小時尿液，標示總量，混合均勻取8~10 ml送檢。72小時前禁食caffeine/香草/香蕉/酒
12002	Widal & Weil-feilx test	含分離膠之生化試管	3ml以上 血液			
10012	Zn					
12169T	第2孕期唐氏症篩檢(4指標)					

新北市立聯合醫院 臨床病理科 採檢容器總覽表(臨床病理科-4-OP-0005-01)

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：大安聯合檢驗所						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	可加做時間	備註
E4004C	IGRA(CDC專案輔助)	專用試管	各1mL血液	1週	不可加做	
66	乙型鏈球菌	微生物採檢棒	Vaginal swabs			
13028B 13029B	困難縮狀桿菌GDH抗原及A&B毒性測試	專用採集盒	微量糞便			花生粒大小即可
12149	IgG4	含分離膠之生化試管	3ml以上血液			每周一、四操作。
08153T	Vit D	含分離膠之生化試管	3ml以上血液			
13052T	IGRA(自費)	專用試管	各1mL血液			
07012	Parasite ova(濃縮法)	濃縮法糞便盒	糞便			花生粒大小即可
09134	iFOB	專用採集盒	微量糞便			

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：台美醫事檢驗所						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	可加做時間	備註
13025B	Acid Fast stain	無菌尖底50mL離心管	檢體量需3~10mL 腦脊髓液、關節液、痰液、胸水、腹水、心包膜積	2工作天	不可加做	1、檢驗單及檢體需獨立開單送驗。 2、室溫或冷藏保存均可。
13026A~T	TB culture(依檢體類別，已預帶Acid Fast stain)	無菌尖底50mL離心管	檢體量需5~15mL 腦脊髓液、關節液、痰液、胸水、腹水、心包膜積水...	2~3個月		
12188	TB-PCR	無菌盒	≥3mL	4工作天		

檢驗類別： <input type="checkbox"/> 血液 <input type="checkbox"/> 血液氣體 <input type="checkbox"/> 快速血糖 <input type="checkbox"/> 分子生物 <input type="checkbox"/> 尿液 <input type="checkbox"/> 糞便 <input type="checkbox"/> 血庫 <input type="checkbox"/> 體液 <input type="checkbox"/> 生化 <input type="checkbox"/> 血清免疫 <input checked="" type="checkbox"/> 外送：立人醫事檢驗所						
醫令碼	檢驗項目	採檢容器	檢體量/種類	報告時效	可加做時間	備註
09153T	GAD-Ab	含分離膠之生化試管	3ml以上血液	32工作天	不可加做	
09154T	IA2-Ab			32工作天		
12176T	PHI			7工作天		